

# Gebrauchsanleitung *ClapTzu* Classic Pro Set


## Aufstellen und Zusammenbau der Liege

1. Öffnen Sie die beiden Verschluss-Schnallen und klappen Sie die Liege auseinander. Vermeiden Sie es, die Liege auf rauhem Untergrund zu öffnen, um den Bezug zu schonen. Bringen Sie die Schnallen wieder in die zugeklappte Stellung, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Klappen Sie nun die Liege komplett auf der Seite liegend vor sich aus.
3. Bringen Sie die Liege zum Stand, indem Sie am Griffband ziehen und dabei ein Standbein der Liege mit dem Fuß fixieren, damit sie beim Aufrichten nicht wegrutscht.
4. Die stehende Liege vom Kopf- oder Fußende her gerade ziehen und ausrichten.
5. Die Höhenverstellung erfolgt durch Lösen der Holzknopfschrauben und Umsetzen der unteren Lochleisten, anschließend die Holzknopfschrauben wieder fest anziehen. Die Holzknöpfe zur Höhenverstellung sollten nicht übermäßig fest geschraubt werden, da sie sonst überdrehen können. **Verstellen Sie die Höhe der Liege nur im unbelasteten Zustand (ohne Patienten)!** Bitte achten Sie darauf, dass alle mitgelieferten Schrauben zur Höhenverstellung angebracht sind.
6. Beim Zusammenbau die Liege auf die Seite legen, wobei ein Standbein mit dem Fuß fixiert werden muß, damit die Liege nicht wegrutscht (siehe Aufbau).
7. Die vier Einklappgelenke der Beine von Hand leicht vorknicken und dann die Liege vorsichtig zusammenlegen. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen! Zum besseren Schutz der Polsterung können Sie die Liege in einer Schutzhülle oder Tragetasche lagern.

## Handhabung der Kopfstütze Ergo

8. Die Kopfstütze ist in die beiden Löcher an der Stirnseite einzuführen (a). Der Neigungswinkel und die Höhenverstellung ist durch Lösen der Arretierung zu verstellen (Schnellspannhebel umlegen). Danach die Arretierung wieder festziehen.

Bitte belasten Sie die Kopfstütze mit höchstens 7 kg (ca. Gewicht des Kopfes)!

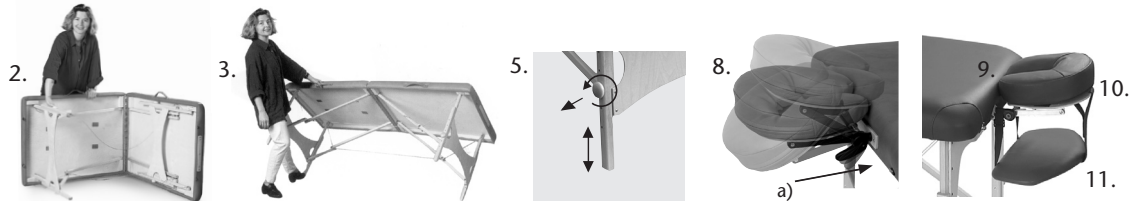

## Montage der Armablage

9. Hängen Sie die beiden Gurtschlaufen der Armablage an der Tischunterseite über die beiden Einsteckholme der Kopfstütze (Polsterseite der Armablage zeigt nach oben).
10. Ziehen Sie die Klettschlaufe um die Holzauflage für das Kopfpolster herum und kletten sie fest.
11. Hängt die Armablage noch nicht waagrecht, variieren Sie die Länge der Gurtbänder bzw. der Klettschlaufe.

## Pflege/Wartung

Maximales Arbeitsgewicht: 200 kg

Die Polsterfläche mit Neutralseife oder milden Desinfektionsmitteln mit höchstens 30% Alkoholgehalt abwischen: Es sind keine weiteren Pflegemaßnahmen für den Materialerhalt erforderlich. Die Massagebank ist wartungsfrei.

Bei ölreichen Anwendungen sollte der Tisch durch einen Überzug geschützt werden. Frisch gefärbte Haare sowie nicht farbechte Textilien können auf der Kunstlederfläche Verfärbungen hinterlassen.

Keine heißen oder glühenden Gegenstände auf die Kunstlederfläche legen. Aufgelegte Heizdecken nicht ohne Aufsicht lassen.

Übermäßige punktuelle, ruckartige Belastungen können zu Schäden führen. Massageliege nicht zweckentfremden (z.B. Sportübungen o. ä.), da sonst die Stabilität nicht gewährleistet ist. Bitte richten Sie sich erst auf und drehen Sie sich dann seitwärts, sodass Sie mittig sitzen, wenn Sie den Tisch verlassen. Die Tischoberfläche kann in Verbindung mit Massageöl rutschig sein.

Lassen Sie Ihren Patienten nicht unbeaufsichtigt auf der Liege verweilen.